

SRソフトビジョンシリーズ ホームページからのソフトウェアダウンロード方法

【1】準備 (シリアル番号の確認)

数値版、足圧版はセンサーシート裏面に記載

全身版、半身版は梱包箱に記載



数値版



足圧版



半身版: HC17B1BQKから始まる15桁
全身版: HC12B2AMKから始まる15桁

数値版: HC02B45LMから始まる15桁
足圧版: HC10E42MMから始まる15桁

【2】ホームページにアクセス

https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/download_soft/download_soft.php

住友理工 SRソフトビジョン

検索

①ダウンロード ②ソフトダウンロード の順にクリック

重要なお知らせはこちらをご確認ください

ダウンロード

カタログ・取扱説明書ダウンロード

ソフトダウンロー

製品情報

【3】ダウンロードしたいソフトウェアを選択



【4】シリアル番号の入力

①シリアル番号を入力 ②使用許諾同意チェック ③次へ
※0(ゼロ)と0(オー)などの入力ミスにご注意ください




画面例 (数値版)

【5】ダウンロードを開始する

最新版をダウンロードをクリックするとダウンロードが開始します



画面例 (数値版)

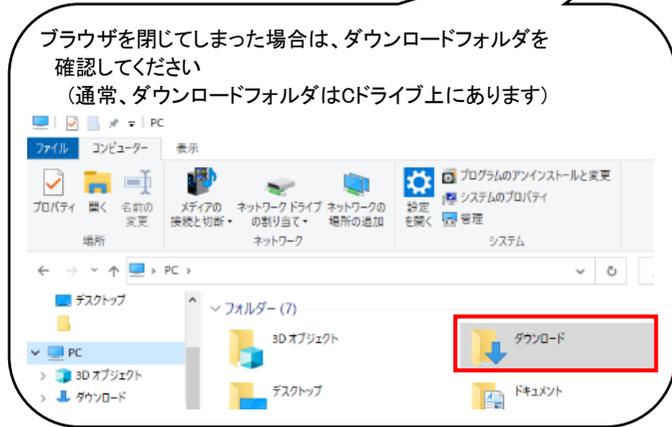


ブラウザを閉じてしまった場合は、ダウンロードフォルダを確認してください
(通常、ダウンロードフォルダはCドライブ上にあります)

【6】ダウンロード完了

ダウンロードフォルダに、ZIPフォルダがダウンロードされます



Microsoft Edge (例) 画面上部にダウンロードポップアップが表示される

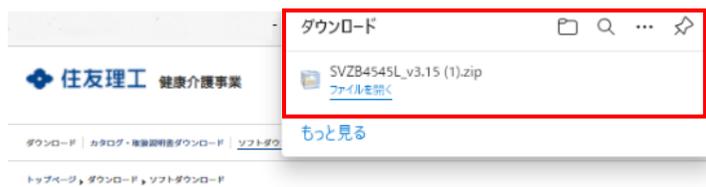

インストーラーは圧縮フォルダ(ZIP形式)でダウンロードされます

機種別のZIPフォルダ名称	
数値版	SVZB4545L_v***.zip
全身版	SVZB922AM_v***.zip
半身版	SVZB1A1BQ_v***.zip
足圧版	SVXE4042M_v***.zip

***はバージョン番号

お問い合わせ ■ お客様相談室 フコク物産株式会社 内
電話: 03-3765-3228
E-mail: kikaku@fukoku-bussan.jp
■ 製造元 住友理工株式会社
電話: 0120-93-1910
E-mail: tri-health-contact@jp.sumitomoriko.com

SRソフトビジョンシリーズ ソフトウェアインストール方法

【1】Zipフォルダを開く

ダウンロードフォルダ内のZIPフォルダをダブルクリックすると、デスクトップ上に解凍(展開)後のフォルダが作成され、自動的に開きます



画面例(数値版)

※パソコンのOSやバージョンにより動作が異なります

ダブルクリックで解凍できない場合は、右クリック⇒すべて展開 を選択してください

ダウンロードの際、「ファイルを開く」ボタンを押した場合は【2】からスタートしてください

【2】インストールウィザードの開始

■数値版、足圧版



setup.exe をダブルクリックするとインストールが開始します

■全身版、半身版



Luncher.exe をダブルクリックすると、Adobe Flash Playerが開きます



インストールをダブルクリックするとインストールが開始します


【3】インストールウィザードの実行

次へ をクリックしてインストールを実行

■数値版、足圧版



■全身版、半身版

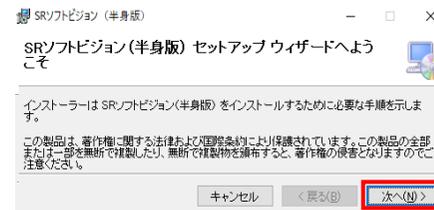


【4】インストールフォルダの選択⇒実行


ソフトウェアのインストール先を選択後、「次へ」をクリック

※変更しない場合、C:\Program Files (x86)\SRK にインストールされます

■数値版、足圧版

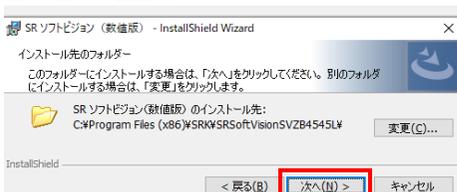

「インストール」をクリック

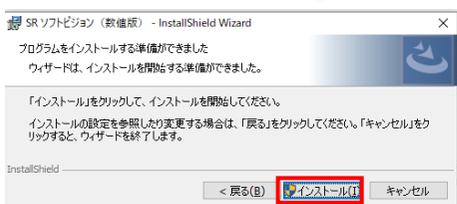


■全身版、半身版


インストール フォルダの選択



※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「はい」をクリックしてください。

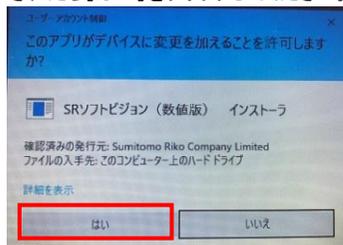

【5】ドライバのインストール

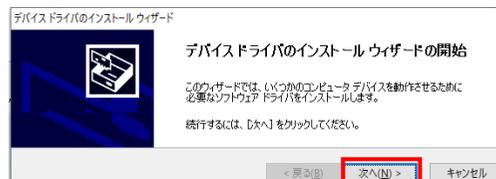

【6】完了

デスクトップにショートカットアイコンが作成されます



Win10 でインストールができない場合

「Sモード」が無効になっていることを確認ください

Sモードの解除方法

- ①[設定]、[更新とセキュリティ]、[ライセンス認証]の順に開く
- ②[Windows 10 Home に切り替える] または [Windows 10 Pro に切り替える] セクションを見つけて、[Microsoft Store に移動] リンクを選択
- ③Microsoft Store で表示されたページ (Sモードをオフにする、またはこれに似た名前) で、[入手] ボタンを選択します。

この操作を完了すると、Microsoft Store 以外にもアプリをインストールできるようになります