

NEW

スマートフォン、タブレット、パソコンとワイヤレスで接続可能

SRソフトビジョン (数値版) (ワイヤレス)

Smart Rubber

品番 SVZB4545L SVRB0000N

メーカー希望小売価格 **379,000円(税別)**

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)は、「SRソフトビジョン(数値版)」と「SR無線化ユニット」のセット商品です。



SR無線化ユニット

※表示端末(パソコン、タブレット等)は別途ご用意ください。



有線タイプはケーブルが邪魔になりがち




SR無線化ユニットを活用し様々なシーンでスマートに計測可能




無線化ユニットと表示端末は無線LANで接続

表示画面例 (推奨ブラウザ Google Chrome)

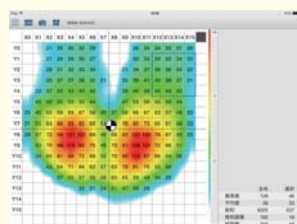

1画面表示

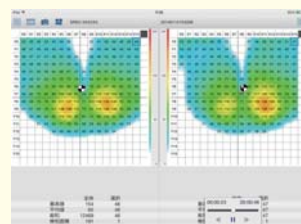

2画面表示

Point 1 専用アプリのインストール不要

ビューワーは、ブラウザ(Google Chrome)を利用、より多くの端末で表示可能になりました



Point 2 データロガー機能の追加

SRソフトビジョン(数値版)とSR無線化ユニットのみでも動画の撮影、保存ができます

※SRソフトビジョン(数値版)とSR無線化ユニットのみでの静止画の撮影はできません

計測データはSR無線化ユニット内のSDカードに自動保存されます



計測データのパソコン移行

SDカードやUSBメモリを用いて簡単にパソコンに移行できます。



注意事項

- ①表示端末の対応機種は、弊社ホームページでご確認ください
- ②表示端末への計測データの自動保存はできません
Windows以外のOSをご利用の場合、計測データの表示にはSR無線化ユニットとの接続が必要です
- ③計測データの表示端末への移行は、SR無線化ユニット本体のSDカードまたはお持ちのUSBメモリをご利用ください
- ④計測データの分析・解析には、SRソフトビジョン(数値版)ビューワーソフト(Windowsでのみ利用可能)が必要です

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)で取得したデータは、SRソフトビジョン(数値版)データと共通形式です。計測はスマートフォンで手軽に、データ解析はパソコンでじっくりと、シーンに応じて使い分けできます。

SRソフトビジョンの仕様

SRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)は、「SRソフトビジョン(数値版)」と「SR無線化ユニット」のセット商品です。

SRソフトビジョン(数値版)

外観写真	
品番	SVZB4545L
価格	メーカー希望小売価格:329,000円(税別)
サイズ(感圧エリア)	450×450mm(350×350mm)
質量	260g (取付器具は含まない)
電源	USB給電5.0V±5%
消費電力	最大400mW
使用温度範囲	10-35℃
使用湿度範囲	30-80%(結露しないこと)
画面更新間隔	約0.2秒
計測ポイント	256箇所(16×16)
空間分解能	22mm角
測定範囲	20-200mmHg

- ▲ SRソフトビジョンは医療機器ではありませんが、ペースメーカー、人工呼吸器等の医療機器と併用する場合は、医療機器メーカーおよび医師の指示に従ってご使用ください。
 - ▲ 安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 - ▲ SRソフトビジョンは、座っているまたは寝ている状態での身体にかかる圧力分布を測定するものです。それ以外の目的では使用しないでください。
- POINT** SRソフトビジョン(数値版)をお持ちの方は、SR無線化ユニット単体の追加購入によりSRソフトビジョン(数値版ワイヤレス)としてご利用頂けます。

SR無線化ユニット


外観写真		
品番	SVRB0000N	
価格	オープン価格	
サイズ	93×178×26mm(突起物を含まない)	
質量	約400g	
電源	ニッケル水素系二次電池 付属ACアダプタ駆動	
消費電力	DC12V:3W(最大36W) 二次電池での連続動作時間 5時間	
使用温度範囲	0 ~ 40℃	
使用湿度範囲	30 ~ 80%(結露しないこと)	
準拠規格	IEEE802.11 g/n(2.4GHz) IEEE802.11 n (5GHz)	
使用周波数帯	2.4GHz帯 / 5GHz帯	
無線LAN	チャンネル	1~13チャンネル
	通信距離	見通し10m (ただし屋内自由空間、障害物なしの環境にて) ※通信距離を保証するものではありません。 ご利用環境や接続機器などにより異なります

■ACアダプタ仕様

入力	AC100V 50/60Hz 70VA
出力	DC12V 3.0A

パソコンで利用する場合 [SR無線化ユニットを利用せず、SRソフトビジョン(数値版)をUSBケーブルでパソコンに接続]
SRソフトビジョン(数値版)に付属のCDからビューワソフトをインストールし、お手持ちのパソコン(Windows)で利用してください。

[表示画面例]

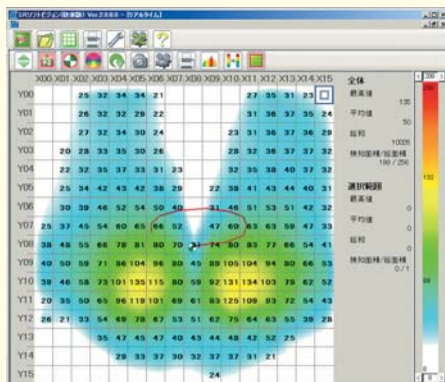

SRソフトビジョン(数値版)のご使用環境(推奨)	
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.4GHz相当以上
Memory	2GB以上
OS	Windows® XP SP3 Windows Vista® SP2 Windows® 7 SP1 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10(ビルド10240)※日本語版のみ
Visual C ++ 2008ランタイム	Visual C ++ 2008 ランタイムが 正常にインストールされ動作すること
.Net Framework	.Net Framework 2.0 または.Net Framework 4.0が 正常にインストールされ動作すること
USB	正常に使用できるUSBポート(USB 2.0規格)
画面解像度	1024×768以上

※住友理工製品及び関連資料等に記載されている会社名及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。

お問い合わせ
ご相談は **フコク物産株式会社**
〒143-8531 東京都大田区大森西2丁目32番7号
特販営業部 Tel:03-3765-3228
<http://www.fukoku-jp.net/srsoftvision/>

製造元 **住友理工株式会社**
健康介護事業室 Tel:0568-77-2975
<https://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/products.html>

記載の内容につきましては予告なく変更される可能性があります
2020年1月